

## FICHA TÉCNICA CERA AZUL TIPO 2 MARCA ARIAS

## **PROPIEDADES**

Combinación de diversas ceras que tienen propiedades termoplásticas y cuya composición determina su utilidad, son poliésteres de ácidos y alcoholes, formados por cadenas hidrocarbonadas.

Se utiliza mayormente en laboratorios dentales bajo el calentamiento de mecheros para de esa manera obtener buenas impresiones.

Gracias a sus propiedades plástica y elástica, permite modelar tanto por la metodología por adición de cera como por substracción. La cera para modelar azul tipo 2 es utilizada para incrustaciones, coronas partes de un removible. Se pueden modelar partes de un removible como retenedores, descansos oclusales y terminación fine line.

La cera Azul tipo 2 marca Arias, es totalmente calcinable, se emplea para el procedimiento llamado cera perdida.

La cera para modelar se quema durante el calentamiento del anillo. Forma carbono, eliminado por oxidación, transformándose en gases volátiles a una temperatura de 500°C, no deja residuos que excedan 0.1% del peso original

<u>APROBÓ</u>: Ing. Alejandro Domínguez Martínez Control de Calidad

Productos Dentales Marmat, S.A. de C.V Viveros del Alamo 27 Col. Viveros de la Loma Tlalnepantla, Edo de México CP54080 Tels. 5555534163 5552864892